



BENU
PRODUTOS E EVENTOS



Benu Produtos e Eventos Especiais LTDA.®

Guarde estas instruções junto ao check list de manutenção em local seguro e acessível.

Reserve um tempo para se familiarizar com as instruções e manutenção deste equipamento antes de utilizá-lo. Guarde a folha de instruções em local seguro e acessível. A Folha de instruções deve ser lida e acessível a todas as pessoas que utilizarão os equipamentos da Benu.

Contém:

- 1 - Balanço You
- 2- Quatro tiras de suspensão 1,20 m

Medidas:

- Espessura: 15 cm
- Comprimento: 1,20 m
- Largura: 70 cm

Garantia: Três meses contra defeitos de fabricação

Peso: 2 Kg; **Comporta:** Kg

Descrição técnica:

Um recurso delicioso com leve compressão, ativando os sistemas vestibular proprioceptivo e tátil ao mesmo tempo!

Função e uso do equipamento:

O Balanço You é todo de espuma, então ele é bastante flexível e ele vem com quatro pontos de fixação, mas pode ser usado nas suspensões quatro pontos, dois pontos ou um ponto giratório.

Ele dá a essa sensação de conforto, de segurança e de tato profundo, o balanço pode ser utilizado de diversas formas e a mais óbvia que todo mundo olha e vai usar é o linear que vai balançar para frente e para trás. Mas não esqueça que dá para fazer o látero lateral também que é um estímulo muito positivo nas disfunções vestibulares e dá para trabalhar muito nas posições de extensão e de flexão antigravidade que são excelentes para trabalhar o controle postural das crianças.

Uma outra coisa que a gente pode trabalhar com o balanço do além dessa postura de extensão antiviral idade é a integração bilateral quando a gente coloca algum objeto, ou uma corda para a criança puxar, além do sistema proprioceptivo e de todas as habilidades de planejamento motor.

Ficha Técnica:

Balanço You®

Importante:

A Folha de instruções deve ser lida e acessível a todas as pessoas que utilizarão os equipamentos da Benu.



Instalação:

Deve ser feita por um adulto.

Apertar os mosquetões e transpassá-lo nas tiras de suspensão do equipamento e também nas tiras de suspensão do seu suporte de teto fixo ou giratório.

Vistoria Preventiva:

Os equipamentos de suspensão necessitam de vistoria preventiva mensalmente, verificando os itens abaixo:

- Integridade da tira de suspensão do equipamento e da tira que está transpassada no suporte de teto ou da estrutura.
- Aperto dos parafusos e fixadores do teto ou estrutura onde o balanço será suspenso.
- Ruídos atípicos nas estruturas e fixações.
- Estabilidade das estruturas (Furação de sustentação e fixação).
- Ranhuras ou fissuras nos pontos de solda da estrutura.

Ao constatar algum dos itens acima fotografe e entre em contato imediatamente com a Benu para verificação e suporte.

Manutenção:

A lycra pode ser lavada na máquina, no programa delicado, e, de preferência, dentro de uma fronha.

Caso queira, pode apenas lavá-la com ajuda de uma bucha (parte amarela) e detergente ou sabão em pó.

Não deixar de molho, pois a cor de um tecido pode migrar pro outro e manchar os tecidos.

Após centrifugar, pendurar imediatamente. Não utilizar amaciantes, pois eles prejudicam na performance do elastano. Amaciantes selam o tecido. Toda ferragem (como as argolas niqueladas deste recurso) devem ser vistoriadas mensalmente. Utilize **IMEDIATAMENTE** em caso de corrosão da argola, isso pode levar anos. Porém com uso extremamente intenso, pode ocorrer fadiga e corrosão prematura das ferragens quando em contato com outras ferragens como mosquetões, manilhas e olhais, necessitando uma vistoria mensal por parte das terapeutas ocupacionais em contato diário com o recurso.

Precauções de segurança:

A segurança de seus clientes depende da escolha apropriada de atividade adequada, mas que desafie suas habilidades. Use técnicas de detecção de segurança, além de checar a área de atividade, instalações adequadas e a manutenção crítica de seu equipamento.

Nossos equipamentos não se destinam ao uso recreativo ou ao ar livre. Nunca devem ser utilizados sem supervisão.

Esta Folha de Instruções é apenas um exemplo. Não pretende, de forma alguma, substituir as leis locais, estaduais ou federais. Esteja ciente que é sua responsabilidade verificar todas as informações de segurança pertinentes ao uso e instalação.

Benu Produtos e Eventos Especiais LTDA.®

Para perguntas ou sugestões, entre em contato com a Benu pelos canais abaixo:

Telefone fixo: (31) 3568-0479 | Whatsapp: (31) 99531-1785

Instagram: @benueventos / Tik tok: @benueventos / Site: www.benu.com.br /

Loja: loja.benu.com.br | E-mail: benu.comercial@gmail.com

Somos uma empresa filiada ao CREA/MG - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura MG nº 51971 com Registro Regional: 083955. | Produto PATENTEADO: BR 30 2021 000542-5.