



BENU

PRODUTOS E EVENTOS



Benu Produtos e Eventos Especiais LTDA.®

2 Guarde estas instruções junto ao check list de manutenção em local seguro e acessível.

Reserve um tempo para se familiarizar com as instruções e manutenção deste equipamento antes de utilizá-lo. Guarde a folha de instruções em local seguro e acessível. A Folha de instruções deve ser lida e acessível a todas as pessoas que utilizarão os equipamentos da Benu.

Contém:

- 1 - Benurex
- 2 - Duas tiras de suspensão 1,20 m de 6 gomos

Medidas:

- Altura: 1,01 m
- Comprimento: 1,93 m
- Largura: 50 cm

Garantia: Seis meses contra defeitos de fabricação

Peso: 6 Kg; **Comporta:** 120 Kg

Descrição técnica:

Um recurso onde o brincar símbolo é elevado ao máximo em todas as vezes que o utilizamos.

Engajamento, motivação intrínseca e superação de desafio garantido!

Função e uso do equipamento:

Para incentivar a criança a aproximação pode ser feita com carinho, banho, alimentação ou brincadeiras simbólicas que façam com que tenha a motivação intrínseca para iniciar a atividade e então suspender o equipamento.

Nas disfunções posturais ofereça aceleração e desaceleração do movimento manutenção de postural, contração de abdômen e estabilização de tronco, sendo uma disfunção de modulação de hiperexposta e segurança gravitacional ou atenção ao movimento, tem que ter muita cautela na apresentação desse equipamento.

Tendo disfunção de hiper resposta ou baixo registro vestibular, pode aproveitar do balanço com mais ritmo, velocidade, duração e intensidade desse equipamento.

Utilize sempre da motivação intrínseca para oferecer desafios na medida certa e graduar os estímulos de acordo com as respostas adaptativas do seu paciente. Pode usar em outras posturas que não a postura tradicional sentado de frente.

A criança pode deitar de barriga para baixo e aí vai favorecer a extensão anti gravidade que é uma habilidade muito importante do sistema vestibular e ele também pode sentar de costas fazendo as transições de postura.

Ficha Técnica:

Benurex®

Importante:

A Folha de instruções deve ser lida e acessível a todas as pessoas que utilizarão os equipamentos da Benu.



Instalação:

Deve ser feita por um adulto.

Apertar os mosquetões e transpassá-lo nas tiras de suspensão do equipamento e também nas tiras de suspensão do seu suporte de teto fixo ou giratório.

Vistoria Preventiva:

Os equipamentos de suspensão necessitam de vistoria preventiva mensalmente, verificando os itens abaixo:

- Integridade da tira de suspensão do equipamento e da tira que está transpassada no suporte de teto ou da estrutura.
- Aperto dos parafusos e fixadores do teto ou estrutura onde o balanço será suspenso.
- Ruídos atípicos nas estruturas e fixações.
- Estabilidade das estruturas (Furação de sustentação e fixação).
- Ranhuras ou fissuras nos pontos de solda da estrutura.

Ao constatar algum dos itens acima fotografe e entre em contato imediatamente com a Benu para verificação e suporte.

Manutenção:

A lycra pode ser lavada na máquina, no programa delicado, e, de preferência, dentro de uma fronha.

Caso queira, pode apenas lavá-la com ajuda de uma bucha (parte amarela) e detergente ou sabão em pó.

Não deixar de molho, pois a cor de um tecido pode migrar pro outro e manchar os tecidos.

Após centrifugar, pendurar imediatamente. Não utilizar amaciantes, pois eles prejudicam na performance do elastano. Amaciantes selam o tecido. Toda ferragem (como as argolas niqueladas deste recurso) devem ser vistoriadas mensalmente. Utilize **IMEDIATAMENTE** em caso de corrosão da argola, isso pode levar anos. Porém com uso extremamente intenso, pode ocorrer fadiga e corrosão prematura das ferragens quando em contato com outras ferragens como mosquetões, manilhas e olhais, necessitando uma vistoria mensal por parte das terapeutas ocupacionais em contato diário com o recurso.

Precauções de segurança:

A segurança de seus clientes depende da escolha apropriada de atividade adequada, mas que desafie suas habilidades. Use técnicas de detecção de segurança, além de checar a área de atividade, instalações adequadas e a manutenção crítica de seu equipamento.

Nossos equipamentos não se destinam ao uso recreativo ou ao ar livre. Nunca devem ser utilizados sem supervisão.

Esta Folha de Instruções é apenas um exemplo. Não pretende, de forma alguma, substituir as leis locais, estaduais ou federais. Esteja ciente que é sua responsabilidade verificar todas as informações de segurança pertinentes ao uso e instalação.

Benu Produtos e Eventos Especiais LTDA.®

Para perguntas ou sugestões, entre em contato com a Benu pelos canais abaixo:

Telefone fixo: (31) 3568-0479 | Whatsapp: (31) 99531-1785

Instagram: @benueventos / Tik tok: @benueventos / Site: www.benu.com.br /

Loja: loja.benu.com.br | E-mail: benu.comercial@gmail.com

Somos uma empresa filiada ao CREA/MG - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura MG nº 51971 com Registro Regional: 083955. | Produto PATENTEADO: BR 30 2021 000542-5.