



BENU
PRODUTOS E EVENTOS



Benu Produtos e Eventos Especiais LTDA.®

2 Guarde estas instruções junto ao check list de manutenção em local seguro e acessível.

Reserve um tempo para se familiarizar com as instruções e manutenção deste equipamento antes de utilizá-lo. Guarde a folha de instruções em local seguro e acessível. A Folha de instruções deve ser lida e acessível a todas as pessoas que utilizarão os equipamentos da Benu.

Contém:

1 - Casulo lycra duas camadas

Medidas:

Padrão

- Comprimento: 1,50 m
- Largura: 1,40 m

Grande

- Comprimento: 2,40 m
- Largura: 1,20 m

Garantia: Três meses contra defeitos de fabricação

Peso: 2 Kg; **Comporta:** 100 Kg

Descrição técnica:

Malha em lycra tecnológica. Resistente e com qualidade garantida. Produto com proteção uva e uvb com fator 50, podendo ser utilizado em ambientes externos. Múltiplas cores.

Função e uso do equipamento:

O casulo de duas camadas, ele tem uma resistência maior pois com essa camada não desgasta facilmente com o peso da criança.

Pelo fato de ter duas camadas e serem soltas, consegue realizar atividades que vão variar tanto da criança e de uma camada para outra. Proporcionando estímulos proprioceptivos fazendo com que a criança encolha o corpo tendo contração muscular, articular fazendo com que a criança fique em uma posição mais fechada. Outro estímulo muito importante que consegue oferecer é o vestibular, fazendo movimentos tanto lineares de um lado pro outro, para frente, para trás, quantos movimentos são angulares, que pode rotacionar ou fazer um ângulo maior mesmo com movimentos orbitários. Todo o estímulo que consegue com esse recurso maravilhoso é o tato profundo. Porque consegue deixar a criança bem apertadinha lá dentro e pressionar a pele de uma forma com que ative os receptores que ficam na superfície mais profundas da pele e isso vão ser vias inibitórias que vão ajudar a criança no processamento de quando tem dificuldade de defensividade tátil e insegurança gravitacional que eleva o nível de alerta dela conseguindo abaixar.

Ficha Técnica:

Casulo 4 Camadas®

Importante:

A Folha de instruções deve ser lida e acessível a todas as pessoas que utilizarão os equipamentos da Benu.



Instalação:

Deve ser feita por um adulto.

Apertar os mosquetões e transpassá-lo nas tiras de suspensão do equipamento e também nas tiras de suspensão do seu suporte de teto fixo ou giratório.

Vistoria Preventiva:

Os equipamentos de suspensão necessitam de vistoria preventiva mensalmente, verificando os itens abaixo:

- Integridade da tira de suspensão do equipamento e da tira que está transpassada no suporte de teto ou da estrutura.
- Aperto dos parafusos e fixadores do teto ou estrutura onde o balanço será suspenso.
- Ruídos atípicos nas estruturas e fixações.
- Estabilidade das estruturas (Furação de sustentação e fixação).
- Ranhuras ou fissuras nos pontos de solda da estrutura.

Ao constatar algum dos itens acima fotografe e entre em contato imediatamente com a Benu para verificação e suporte.

Manutenção:

A lycra pode ser lavada na máquina, no programa delicado, e, de preferência, dentro de uma fronha.

Caso queira, pode apenas lavá-la com ajuda de uma bucha (parte amarela) e detergente ou sabão em pó.

Não deixar de molho, pois a cor de um tecido pode migrar pro outro e manchar os tecidos.

Após centrifugar, pendurar imediatamente. Não utilizar amaciantes, pois eles prejudicam na performance do elastano. Amaciantes selam o tecido. Toda ferragem (como as argolas niqueladas deste recurso) devem ser vistoriadas mensalmente. Utilize **IMEDIATAMENTE** em caso de corrosão da argola, isso pode levar anos. Porém com uso extremamente intenso, pode ocorrer fadiga e corrosão prematura das ferragens quando em contato com outras ferragens como mosquetões, manilhas e olhais, necessitando uma vistoria mensal por parte das terapeutas ocupacionais em contato diário com o recurso.

Precauções de segurança:

A segurança de seus clientes depende da escolha apropriada de atividade adequada, mas que desafie suas habilidades. Use técnicas de detecção de segurança, além de checar a área de atividade, instalações adequadas e a manutenção crítica de seu equipamento.

Nossos equipamentos não se destinam ao uso recreativo ou ao ar livre. Nunca devem ser utilizados sem supervisão.

Esta Folha de Instruções é apenas um exemplo. Não pretende, de forma alguma, substituir as leis locais, estaduais ou federais. Esteja ciente que é sua responsabilidade verificar todas as informações de segurança pertinentes ao uso e instalação.

Benu Produtos e Eventos Especiais LTDA.®

Para perguntas ou sugestões, entre em contato com a Benu pelos canais abaixo:

Telefone fixo: (31) 3568-0479 | Whatsapp: (31) 99531-1785

Instagram: @benueventos / Tik tok: @benueventos / Site: www.benu.com.br /

Loja: loja.benu.com.br | E-mail: benu.comercial@gmail.com

Somos uma empresa filiada ao CREA/MG - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura MG nº 51971 com Registro Regional: 083955. | Produto PATENTEADO: BR 30 2021 000542-5.